



## STATIM 2000 / 5000S KASSETTEAUTOKLAVE

### BRUG ALTID DAMPDESTILERET VAND.

Den elektroniske føler vil fortælle hvornår der skal påfyldes destilleret vand. De ioniseret, demineraliseret eller specialfiltreret vand, rustfjernere eller lign. MÅ IKKE ANVENDES.

### RENS OG SKYL ALLE INSTRUMENTER FØR AUTOKLAVERING.

STATIM's komponenter er følsomme overfor små partikler, som kan forårsage tilstopninger og medføre serviceeftersyn.

### STAT-DRI.

Anvend STAT-DRI ved hver 10. cyklus, ved hver indpakket cyklus samt hver gang kassetten renses.

### VISER DISPLAYET "IKKE STERIL"

Skriv fejlkode ned. Giv Deres STATIM leverandør besked og man vil straks assistere Dem med en hurtig løsning / service.

VEDLIGEHOLDELSE		
DAGLIGT	KONDENSBEHOLDER	Tøm kondensflasken hver gang de påfylder vandbeholderen. Fyld med vand fra hanen til min. linien. De kan også tilsætte lidt desinfektionsmiddel uden klorin.
UGENTLIGT	KASSETTEN	Mindst en gang om ugen, bør kassetten rengøres indvendig, med et normalt opvaskemiddel. Efter rengøring, anvendes "STAT-DRI". Dette nedsætter overfladespændingen, med en efterfølgende bedre tørring af instrumenterne.
	VANDBEHOLDER	Tøm vandbeholderen for vand over weekenden, for at undgå spore dannelse. Hvis apparatet bruges få gange i løbet af ugen, tilrådes det at vandbeholderen tømmes efter endt arbejdsdag.
KVARTALVIS	MIKROBIOLOGISK FILTER	Skift mikrobiologisk filter hver 2-3 mdr.
HVERT HALVE ÅR	KASSETTE PAKNING	Skift kassette pakningen efter hver 500 cyklus eller hvert halve år (afhængig af hvad der kommer først).

NIPO TEKNIK APS

Violvej 38, DK-8240 Risskov, Tlf. +45 86 17 17 47, Mobil +45 51 44 71 07

Email: [info@nipoteknik.dk](mailto:info@nipoteknik.dk), hjemmeside: [www.nipoteknik.dk](http://www.nipoteknik.dk)

## SciCan

### STATIM 500S KASSETTEAUTOKLAVE

Cyklusser							
Type test	UINDP FASTE INSTR (N) 134°C / 3,5 MIN	UINDP HULE INSTR (S) 134°C / 3,5 MIN	UINDP HULE INSTR (S) 134°C / 18 MIN	INDP HULE INSTR (S) 134°C / 3,5 MIN	INDP HULE INSTR (S) 134°C / 18 MIN	GUMMI/PL ASTIK (S) 121°C / 15 MIN	GUMMI/PL ASTIK (S) 121°C / 30 MIN
Solidt gods - uindpakket	X	X	X	X	X	X	X
Solidt gods - enkeltindp akket				X	X	X	X
Hult gods B		X	X	X	X	X	X
Hult gods - enkeltindp akket				X	X		
Cyklus tid Kold enhed / Varm enhed	13.15	17.30	32:00	24:00	38:30	22.50	37:50
	8.45	10.50	25:20	15.30	30:00	20.20	35:20
Maks, fyldning	1,0 kg	1,0 kg	1,5 kg	1,0 kg	1,5 kg	0,4 kg	0,4 kg

NIPO TEKNIK APS

Violvej 38, DK-8240 Risskov, Tlf. +45 86 17 17 47, Mobil +45 51 44 71 07

Email: [info@nipoteknik.dk](mailto:info@nipoteknik.dk), hjemmeside: [www.nipoteknik.dk](http://www.nipoteknik.dk)