



## Statim kassette autoklave

- **Brug altid dampdestilleret vand**

Den elektroniske føler, vil fortælle hvornår der skal påfyldes destilleret vand. Deioniseret, demineraliseret eller specialfiltreret vand, og lignende, **MÅ IKKE ANVENDES.**

- **Rens og skyl alle instrumenter før autoklaving**

STATIM's komponenter er følsomme, overfor små partikler, som kan forårsage tilstopninger, og medføre drift fejl / service eftersyn.

- **Stat Dri.**

Anvend STAT DRI en til to gange ugentlig, og hver gang ved indpakket program

- **Rens kassetten indvendigt.**

Ugentlig bør kassetten rengøre indvendigt, med et normalt opvaske middel. Efter rengøringen anvendes Stat Dri, dette nedsætter overflade spændingen, med efterfølgende bedre tørring.

- **Skulle damp lække fra fronten, eller vand dryppe under app.**

Kontroller kassette pakningen, demonter, rengør denne, eller skift den. Husk at montere den omhyggelig i henhold til anvisningen.

- **Vandet i kondens beholderen.**

Vandstanden er anvist. For at undgå algedannelse, kan tilsættes et par skefulde klorin, eller lignende. Dette vil holde blandingen ganske harmløs.

- **Viser displayet ” ikke steril”.**

Skriv fejlkoden ned, og kontakt deres Statim leverandør, som straks vil assistere Dem med en hurtig løsning / service.

- **LÆS VENLIGST DERES VEJLEDNING, FOR YDERLIGE INFORMATIONER.**
- **Husk at skifte, bio filter hver 2 – 3 måned.**
- **Husk at der ved 2 tast på samme knap, ændres sterilisations tiden**

NIPO TEKNIK APS

Violvej 38, DK-8240 Risskov, Tlf. +45 86 17 17 47, Mobil +45 51 44 71 07

Email: [info@nipoteknik.dk](mailto:info@nipoteknik.dk), hjemmeside: [www.nipoteknik.dk](http://www.nipoteknik.dk)