

Specifikation:

El: 220 VAC 50-60 Hz

Max svejse bredde: 220mm

Effekt: 400 W

Justerbar temperatur: Max. 180C*


Medi Seal

Folie svejsemaskine

Bruger vejledning

NIPO TEKNIK APS

Violvej 38, DK-8240 Risskov, Tlf. +45 86 17 17 47, Mobil +45 51 44 71 07
Email: info@nipoteknik.dk, hjemmeside: www.nipoteknik.dk

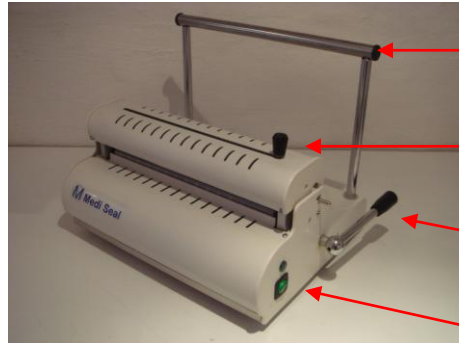


Folie bøile

Folie kniv

Sveise håndtag

Hoved afbryder

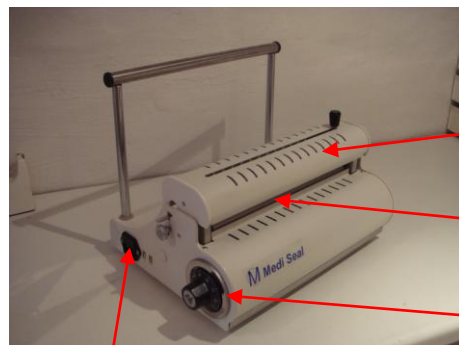

El tilslutning med indb. 3A sikring

Klemme kæbe

Varme element

Termostat regl.

Betjening:

1. Placering af folie rulle.

En folie rulle hænges på akslen, på de 2 opstandere
Placer akslen igen, med plads til 2 ruller.

Træk folien frem, og kontroller at den valgte længde passer.

2. Sveise metode.

Tænd hoved afbryderen. Når lampen er slukket indikerer det at
temperaturen er korrekt, og svejsning kan begynde.

Drej håndtaget ned i ca. 4 sekunder, og flyt ikke kæben med
magt under denne proces.

3. Skær sveise posen.

Bevæg hurtigt skærehåndtaget, fra en side til den anden.
Afskæringen er foretaget nøjagtigt, når kniven bevæges.

Vedligehold:

1. Juster skruen under pladen, indtil svejsning er opnået.

Løsen de 2 skruer, på sidepladen før justeringen foretages.

2. Udskiftning af knive

Fjern håndtaget og de 2 skruer på afdækningen.

Fjern dækslet, fjern de 4 M4 skruer. Skift knivene.

Monter igen, i omvendt rækkefølge.

3. Udskiftning af sikring.

Som diagrammet viser, fjern stikket, skift sikringen og monter
Igen.