


Medi Clave

DAGLIG BRUGER VEJLEDNING

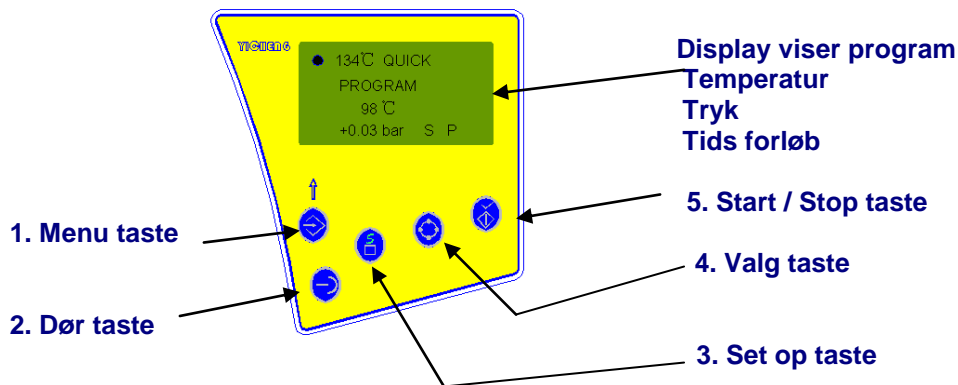

Udsender autoklaven en hyletone, og viser E1 på displayet, mangler den destilleret vand. Anvend bægeret til påfyldning, så undgås unødvendigt spild.

Udsender autoklaven en hyletone, og viser E2 på displayet, skal brugt vand beholderen tømmes.

Startes forkert program, eller afbrydes en cyklus af anden årsag, tast STOP på 5. Døren aflåses med 2 (resættes), hvorefter autoklaven er klar til nyt P valg.

Når opvarmningen er påbegyndt, kan programmet ikke afbrydes i utide.

Når programmet er slut, vil printeren udskrive dokumentation, og med taste 2 aflåses og åbnes døren.

I alle tvivls tilfælde, henvises i øvrigt til bruger manualen.

FORHANDLER:

NIPO TEKNIK APS

Violvej 38, DK-8240 Risskov, Tlf. +45 86 17 17 47, Mobil +45 51 44 71 07

Email: info@nipoteknik.dk, hjemmeside: www.nipoteknik.dk